

Ophthalmologische Gase



Ophthalmologische Gase

| Artikel: | SF6 | | C2F6 | | C3F8 | | PS Kit Ref.304 | GS Kit Ref.305 |
|----------------------------------|--|----------|--|----------|--|----------|---|--|
| Produkt- eigenschaft: | Sulfur Hexafluoride Retinal Gas, 30 ml | | Hexafluorohexane Retinal Gas, 30ml | | Octafluoropropane, Retinal Gas, 30ml | | Präparationskit für 5ml Spritze (mit Luer Lock). Für die Zubereitung einer kleinen Dosis in der sterilen Kammer, (Verbindungsteil und ein Filter sind schon auf der Spritze vorbereitet) | Präparationskit für 50ml Spritze (mit Luer Lock). Für die Zubereitung einer Luft/Gas- Mischung in der sterilen Kammer (Verbindungsteil und Filter sind schon auf der Spritze vorbereitet) |
| Artikelnr.: | 10031979 | 10027792 | 10027881 | 10031980 | 10027791 | 10031981 | 10033476 | 10033011 |
| VPE: | Single | Multi | Single | Multi | Single | Multi | 10 Stk./VPE | 10 Stk./VPE |

| Merkmale der Gase | Expansionsrate | Dauer bis zur vollständigen Expansion | Lebensdauer | Leicht-expansive Konzentration (%) | Nicht expansive Konzentration (%) | |
|-------------------|----------------|---|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----|
| | SF6 | 2 | 1 Tag | 15 Tage | Zwischen 20 und 25 | 20 |
| | C2F6 | 3,3 | 1,5 Tage | 30 Tage | Zwischen 17 und 20 | 16 |
| | C3F8 | 4 | 3 Tage | 60 Tage | Zwischen 14 und 17 | 12 |

| Ein Spezifisches Gas zu jeder Indikation | Netzhautablösung (ohne Proliferation) | SF6 | | |
|---|--|-----|------|------|
| | Diabetische Retinopathie | SF6 | | |
| | Netzhautablösung | | C2F6 | |
| | Makulalöcher | | C2F6 | |
| | Riesennisse | SF6 | C2F6 | |
| | PVR | | | C3F8 |
| | Augentrauma | SF6 | C2F6 | |

Kontakt

W2O Medizintechnik AG, Weiße-Tor-Straße 4, D-76661 Philippsburg

Tel. +49 (0)7256 / 9 25 91 00 | Fax +49 (0)7256 / 9 25 91 10 | info@w2o.de | www.w2o.de

Stand: 23.11.2015

We care!